

### Opdatering af MemoActive

Afslut MemoActive:

Indtast koden på brugerfladen

Klik på INDSTILLINGER

Klik på OPSÆTNING

Klip på SLET AKTIVITET / SLET



Du er nu ude på HTC-en.

Klik på START

Klik på INDSTILLINGER

Klip på SYSTEM

Klik på RYD LAGER

Indtast kode "1234"

Klik på JA



HTC-en slukker og genstarter.

Du ser herefter Windows forberede telefonen til første anvendelse (orange)

Øverst står INDSÆT SIM-KORT...

Klik på SPRING OVER (nederst til højre)

Øverst står BRUG AF SKÆRMSTATUR

Klik på SPRING OVER (nederst til højre)

Øverst står VÆLG WIFI-NETVÆR

Klik på NÆSTE (nederst til højre)

Øverst står GOOGLE LOKALITET

Klik på ACCEPTER IKKE (nederst til højre)

Øverst står KONFIGURER AKTUELT TIDSPUNKT

Klik på INSTIL LOKALTID og indstil

Lige neden under klikkes på DATO som vælges

Klik herefter på ANGIV

Klik herefter på UDFØRT (højre nederste hjørne)

Øverst står SYNKRONISER

Klik på NÆSTE (nederst til højre)

Øverst står FÅ MERE AT VIDE

Klik på UDFØR (nederst til højre)

Så er HTC-en klar til at indsæt det lille micro-SD kort

Tag bagbeklædningen af.

Tag det gamle kort ud (sidder ved den røde knap)

indsæt det nye kort og vend HTC-en – HURTIGT

### **Der spørges om du vil INSTALLERE MemoActive**

**Klik på JA (inden 10 sekunder)**

Der spørges om man vil INSTALLERE ABILIA MEMOACTIVE Excecutable.CAB

Klip på Ja (nederst til venstre)

Vælg placering ENHED

Klip på INSTALLER (nederst til venstre)

Nu står der: ABILIA MEMOACTIVE Excecutable.CAB blev installeret på enheden

Hvis du har brug for mere lagerplads skal du fjerne installerede programmer

Klik på OK (øverst til højre)

Der spørges om du vil INSTALLERE Abilia MemoActive USER program DK.CAB

Klip på JA (nederst til venstre)

Vælg placering ENHED

Klip på INSTALLER (nederst til venstre)

Abilia MemoActive USER program DK.PAB blev installeret på enheden

Hvis du har brug for mere lagerplads skal du fjerne installerede programmer

Klik på OK (øverst til højre)



Der installeres automatisk Falck Igel Micro RollTalk Mette.CAB  
Falck Igel Micro RollTalk program Mette.CAB blev installeret på enheden  
og med småt

Hvis du har brug for mere lagerplads skal du fjerne installerede programmer  
Klik på OK (øverst til højre)

HTC-en slukker og genstarter automatisk i MemoActive.

HTC-en slukker og genstarter i MemoActive

**LAD VÆRE MED AT RØRE VED NOGET INDTIL DEN ER FÆRDIG**

